

アフターサービス

- 1 保証書**（裏表紙に添付しています）
保証書は所定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管してください。
- 2 保証期間** お買い上げ日より1年間です。
- 3 修理・交換を依頼されるとき** 取扱説明書の内容をお確かめいただき、改善しないときは電源プラグを抜き、〔お問い合わせ先〕までご相談ください。
 ≫保証期間中の修理 保証書の規定により無償修理いたします。商品に保証書を添えて〔お問い合わせ先〕までご相談ください。
 ≫保証期間を過ぎての修理 修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。〔お問い合わせ先〕までご相談ください。
- 4** ご使用中に普段と変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店または〔お問い合わせ先〕にご確認ください。
 ※お客様ご自身での分解・修理は危険です。絶対におやめください。
- 5 修理・アフターサービスについてご不明な場合** 〔お問い合わせ先〕までご相談ください。
 修理料金の仕組み・・・■技術料：故障した商品の修理および部品交換などの作業にかかる費用です。
 ■部品代：修理に使用した部品代金です。

骨盤プロリセットエアー保証書

型番	CY-1162		※お買い上げ日		保証期間	
			年	月	日	お買い上げ日より 1 年
※お客様	ご住所	〒	TEL			様方
	フリガナ ご芳名					様
※販売店						

この保証書は、本保証書記載内容で無償修理をさせていただくことをお約束するものです。

- 取扱説明書に従った正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、商品と本書をご持参、ご提示の上お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。無償修理をさせていただきます。
- なお、保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明な場合も〔お問い合わせ先〕までご相談ください。
- この保証書は、本製品を日本国内でご購入かつご使用される場合にのみ有効です。
(This warranty is applied to Products purchased and used solely in Japan.)
- 保証期間内でも、以下の場合は有償修理になります。
 - 取扱説明書に記載されていない誤った使用方法および不当な修理や改造による破損。
 - お買い上げ後、お客様ご自身での輸送、落下等による損傷。
 - 火災、浸水、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、不慮の事故、およびその他天災による損傷。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書にお客様名、お買い上げ日、販売店などの記入がない場合、および確認が取れない場合。
 - 本書の記載内容が書き換えられた場合。(7) 一般家庭以外（業務用）にて使用された場合の故障または損傷。
 - 指定外電源（電圧、周波数）の使用による損傷。(9) ご使用後のキズ、変色、汚れ等の保管上の不備による損傷。
 - 消耗部品の交換。
- ご転居の場合は、事前に〔お問い合わせ先〕にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書および送り状に記載してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼できない場合には、〔お問い合わせ先〕へ直接ご相談ください。
■お客様の個人情報のお取り扱いについて、お客様よりお知らせいただいた氏名、住所などの個人情報は、当社商品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
■この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従って本保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。なお、ご不明な場合は、直接〔お問い合わせ先〕へご相談ください。

〔製品に関する〕 株式会社コニー
〔お問い合わせ先〕 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町1-8-15

TEL：06-6262-0033 受付時間：月～金曜日10:00～17:30（祝日をのぞく）

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。必ず内容をご確認ください。

保管用

C-1



骨盤プロリセットエアー

CY-1162

取扱説明書 PRORESET Air



目次

仕 様	1
安全上のご注意	1
警 告	2・3
注 意	4
各部の名称	5
ご使用の前に	6
ご使用方法	7・8
各コースの詳細	9
「故障かな？」と思ったら	10
お手入れ・保管方法	10
安全点検について	10
アフターサービス	裏表紙
保証書	裏表紙

このたびは、骨盤プロリセットエアーをお買い上げいただき、ありがとうございます。

- ・この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- ・特に「安全上のご注意」は、必ずお読みください。
- ・お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

仕 様

商品名	芦屋美整体 骨盤プロリセットエアー
型番	CY-1162
素材	主材:PP樹脂 クッション材:ウレタンフォーム 張り材:ポリエステル
サイズ	幅:約47cm 奥行:約41cm 高さ:約46cm 重量(約)3.1kg
使用電源	定格電圧:AC100-240V 定格周波数:50-60Hz
セット内容	本体、ACアダプター、取扱説明書(保証書)
耐荷重	100kg
製造国	中国
製造販売元	株式会社コニー 大阪府大阪市中央区安土町1-8-15 [お客様相談室] 06-6262-0033 http://www.cony.co.jp/biseitai/

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」・「注意」の2つに区分けしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 **警告** 取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負うことが想定される危害の程度。

 **注意** 取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害(*2)の発生が想定される危害・損害の程度。

(*1) 重傷とは失明、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

(*2) 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

＜絵表示の例＞

 △記号は、**警告・注意**を促す内容があることを告げるものです。
(左図の場合は、一般的な警告・注意)

 ⊘記号は、**禁止**の行為であることを告げるものです。
図の中に具体的な指示内容(左図の場合は、分解禁止)が描かれています。

 ●記号は、行為を**強制**したり**指示**したりする内容を告げるものです。
図の中に具体的な指示内容(左図の場合は、電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。

○お読みになったあとは、お使いになる人がいつでも見られるところに必ず保管してください。

お願い 本製品を廃棄するときは、お住まいの市区町村の指導に従ってください。

警告

万一、異常や故障が発生したときはすぐに使用をやめてください。

次のようなときは、そのまま使用すると、火災、感電の原因になります。すぐに本体の電源スイッチで電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

 ●煙が出ている、変なおいや音がする。(異常状態)
煙が出なくなるのを確認し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

 ●本製品の内部に水などが入った。

 ●本製品の内部に異物などが入った。

 ●落としたり、本体を破損した。

 医師の治療を受けているときや下記に該当する人は必ず医師と相談のうえ使用する。

- 心臓に障害のある人
- ペースメーカー等の体内植込型医用電子機器を使用している人
- 現在腰痛の人や、過去に腰や背中、足を痛めたことのある人
(椎間板ヘルニア、脊椎すべり症など)
- 変形症関節炎、リュウマチの人
- 骨粗しょう症など骨に異常がある人
- 急性症状のある人
- 妊娠中や生理中の人
- 安静を必要とする人
- 医師から運動を禁じられている人
- リハビリテーションで使用される人
- 上記以外に特に身体に異常を感じている人
(事故、体調不良の原因)

必ず交流100V～240Vで使用する。(火災、感電の原因)

設置の際、商品を広げるときは周囲に人やペットがいないことを確認する。
(事故、けがの原因)

 本製品に水などの液体をかけたり浸したりしない。また、浴室などの水のかかりやすい場所や湿気の多い場所での使用、保管はしない。(感電、故障の原因)

 本製品や操作パネルなどの改造、分解、修理は絶対にしない。
(感電、発火・異常動作によるけがの原因)

⚠ 注 意

⊘ 禁 止	身体が濡れたままの状態では、絶対に使用しない。(感電、故障の原因)
	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。(感電、ショート、火災の原因)
	電源コードの取り扱いについては以下の項目に注意する。 ●傷つけたり、破損させない ●使用時は束ねない ●加工しない ●ねじらない ●無理に曲げたり、引っ張らない ●重いものをのせない ●挟み込んだりしない (電源コードの破損による感電、ショート、火災の原因)
	体重が100kgを超える人は使用しない。(故障、事故の原因)
	幼児や児童に使用させたり、本製品の上で遊ばせない。(事故、けがの原因)
	自分で意思表示ができない人には使用させない。(事故、けがの原因)
	同時に2人以上で使用しない。(事故、けがの原因)
	布カバーをはずしたり、破れた状態では使用しない。(事故、けがの原因)
	座面の下に手や足を入れない。 (事故、けがの原因)
	頭や腹部などには使用しない。(体調不良、けがの原因)
	自動車などの乗り物の中で使用しない。(事故、けがの原因)
	ペットなど動物に使用させたり、本製品の上で遊ばせない。(事故、けがの原因)

⚠ 必ず守る	使用中に身体に異常があらわれたり、感じたときにはただちに使用を中止する。 (事故、体調不良の原因)
	床面が水平な場所に設置して使用する。(故障、事故の原因)
	本製品を使用する前には、電源スイッチや操作パネルが正常に作動するか確認する。 (事故、けがの原因)
	1回の使用時間は15分以内にする。(体調不良の原因)
🔌 電源プラグを抜く	停電のときはただちに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。 (再通電時の事故の原因)
	使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。(漏電、火災、感電の原因)
	お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行う。(火災、感電の原因)
🚫 ぬれ手禁止	電源コードを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜く。 (感電、ショート、故障の原因)
	濡れた手で電源プラグの抜き差しはしない。(感電の原因)
🚫 禁 止	食事の直後や飲酒後は使用しない。(体調不良の原因)
	眠りながら、または眠いときに使用しない。(体調不良、けがの原因)
	ストーブなど火気の近くで使用したり、タバコを吸いながら使用しない。(火災の原因)
	電気毛布、電気敷布、こたつなどの採暖用器具と併用しない。(火災の原因)
	生地を無理に引っ張ったり、刃物やとがった物で突き刺したりしない。(けが、故障の原因)
	本製品を移動するときは、引きずらないようにする。(床や畳を傷つける原因)
	操作パネルに衝撃を与えたり、物を落下させない。(誤動作、故障の原因)
	本製品の上に立ったり、飛び乗ったり、踏み台にしたり、重い物をのせない。 (故障、事故、けがの原因)
	エアバッグに故意に力を加えて無理やり止めない。(故障、けがの原因)
	本製品は一般家庭用なので、業務用として使用しない。(故障、けがの原因)
	お手入れにはベンジン、シンナー、アルカリ性洗剤、漂白剤などは使用しない。 (変色、変形、割れの原因)
	電源プラグはコンセントに確実に差し込み、ゴミを付着させない。 (感電、ショート、発火の原因)

各部の名称

本 体

ヒーター

側面エアークッション

背面エアークッション

収納用フック

※背面

座面エアークッション

操作パネル

骨盤プロリセットコースボタン

ボタンを押すと全てのコースを組み合わせた骨盤プロリセットコースが始まります。動作を停止させる時は、もう一度ボタンを押してください。

強さ調節ボタン

コースを選択した時は最も弱い強さに設定されています。好みの強さを選びお使いください。

ヒーターボタン

電源が入っている状態でボタンを押すと背面の腰部分のヒーターが作動します。停止させる時は、もう一度ボタンを押してください。

ON / OFFボタン

ボタンを押すと電源が入り電源ランプが点灯します。もう一度押すと電源ランプが消灯し電源が切れます。

コース選択ボタン

ボタンを押すと選択したコースが点灯し、好みのコースでお使いいただけます。動作を停止させる時は、コースランプが消えるまでボタンを押してください。

ご注意

- 動作中はそれぞれ動作中のランプが点灯します。
- 操作パネルのボタンを2つ以上同時に押さないでください。故障の恐れがあります。

付属品

ACアダプタ


クッションシール

ご使用の前に

設置のしかた

- 商品を水平に設置できる椅子やソファ、または周囲に障害物のない、床面が水平な場所を選び設置する。
- ※ 床面でご使用の際は、後方への転倒に十分注意してご使用ください。
- ※ 設置面(椅子、ソファ、床など)を傷つけないよう十分に注意してください。気になる方は、マットなどを敷くことをおすすめします。
- 商品を水平に設置するための、十分なスペースを確保してください。
- 手や指を挟まないように注意して置いてください。
- ACアダプターやコントローラーのコードを本体の下敷きにならないようにしてください。

水平な場所

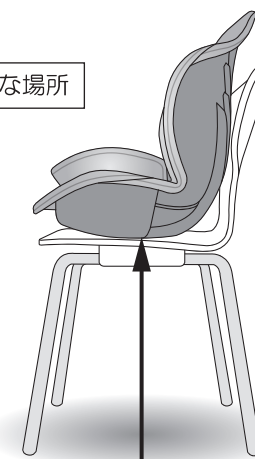

※ 気になる方は、付属のクッションシールを底面の設置面(椅子、ソファ、床など)に接触する箇所に貼ってください。

警告



水場禁止

本製品に水などの液体をかけたり浸したりしない。また、浴室などの水のかかりやすい場所や湿気の多い場所での使用、保管はしない。(感電、故障の原因)

注意







禁止

ストーブなど火気の近くで使用したり、ホットカーペット等の暖房器具の上で使用しない。(火災の原因)
本製品を移動する時は、引きずらないようにする。(床や畳を傷つける原因)

ご使用上の注意

- 使用部位に装身具をつけて使用しないでください。
- 使い始めは、弱いレベル(レベル1)から使い始めてください。
- ヒーター熱に敏感でない人は、十分に注意してお使いください。(室温や使用状況によって異なりますが、ヒーター熱の体感温度は35～45℃の設定となっています。)
- 1回15分でタイマーによりOFFになります。連続使用しないようにお願いします。

ヒーター部

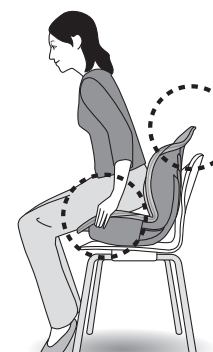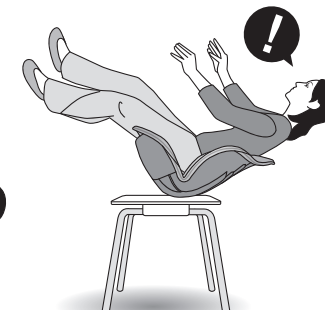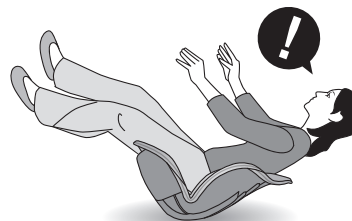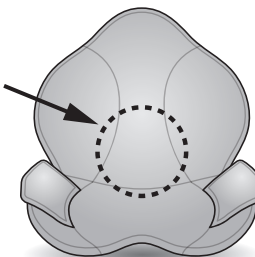


- コントローラーを強く引っばったり、踏まないでください。
- 勢いよく座ったり、座る位置によって後方へ倒れる場合がございますので、十分に注意してご使用ください。
- 背もたれのない椅子や不安定な場所では絶対に使用しないでください。
- 樹脂製のため、部分的に力をかけ過ぎると、荷重に耐えられない可能性があります。(側面や背面など。)


ご使用方法

1 本体背面のACアダプタ差込口にACアダプタを接続します。

※「ACアダプタ差込口」は本体背面の下部にあります。

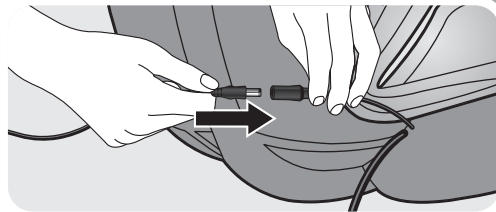

2 電源プラグをコンセントに差し込みます。

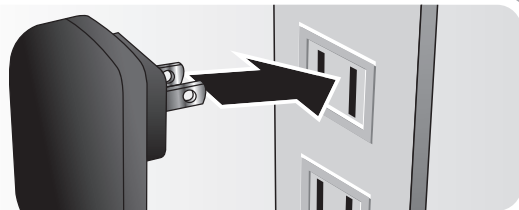


3 商品を設置してください。

商品が水平になるよう設置します。

背もたれのある椅子

※商品を水平に設置できる椅子やソファ、または周囲に障害物のない、床面が水平な場所を選び設置してください。

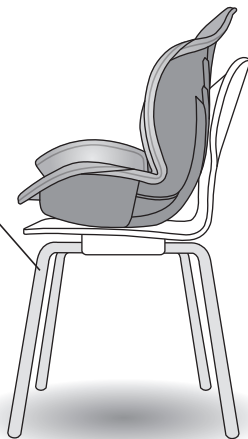

警告



必ず守る

周囲に人やペットがいないことを確認する。
(事故、けがの原因)

ご注意


■ コントローラーを強く引っばったり、踏まないでください。

4 商品に座ります。

右図のように座面と背面がフィットするように座ります。

まっすぐ前を見る。

楽な姿勢で座る。

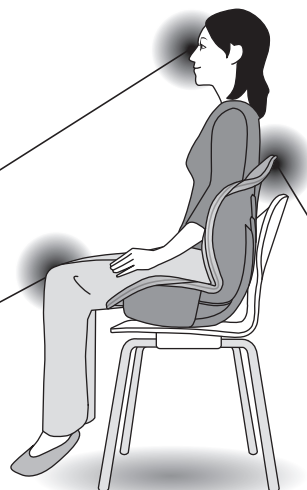

注意



必ず守る

後ろに物が無いか確認してから行ってください。
ご自身の体調や柔軟性を考えて、決して無理のないように行ってください。

座面深くに座り、背すじを伸ばす。

5 電源を入れる。

ON/OFF ボタンを押し、電源を入れます。
電源が入ると電源ランプが点灯します。



6 骨盤プロリセットコースで開始させる。

電源が入っている状態で、**骨盤プロリセット** を押し、全てのコース内容が組み合わされたプログラムが作動します。
強さ調節 で好みの強さを選んでください。
途中でやめたいときは もう一度「骨盤プロリセット」ボタンを押してください。

6 お好みのコースで使う。(P9を参照)

電源が入っている状態で、**コース選択** を押しお好みのコースを選ぶとプログラムが作動します。**強さ調節** で好みの強さを選んでください。コースを変更すると自動的に最も弱い強さから始まります。
途中でやめたいときは コースランプが消えるまで「コース選択」ボタンを押してください。

7 ヒーターを使う。

電源が入っている状態で、ヒーターを押すと、背面の腰部分のヒーターが作動します。
途中でやめたいときは、再度ヒーターを押すとランプが消え、ヒーターが停止します。

8 タイマーが働き、動作が自動的に停止します。

動作開始から15分経過すると、全てのランプが消灯し全ての動作が停止します。

9 電源を切る。

電源が入っている状態で、**ON/OFF** ボタンを押し、電源を切ります。電源が切れると電源ランプが消灯します。

注意





必ず守る

使用中に身体に異常があらわれたり、感じた時にはただちに使用を中止する。(事故、体調不良の原因)

10 電源スイッチを切る。

コンセントから電源プラグを抜き、本体からACアダプターをはずしてください。

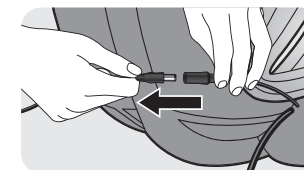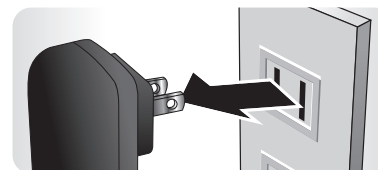

注意




必ず守る

1回の使用時間は15分以内にする。(体調不良の原因)

1 コントローラーをフックに掛け収納します。


背面にある専用フックに
コントローラーを掛けてください。

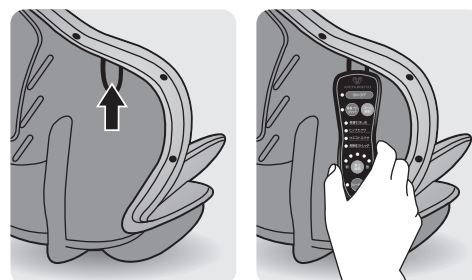

各コースの詳細


骨盤引きしめ

側面のエアバッグが両側から膨らみ、
骨盤まわりを引きしめます。

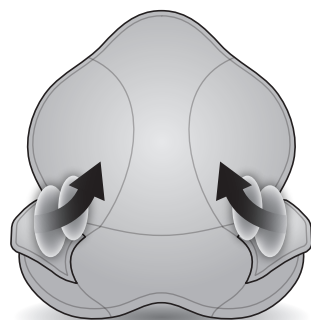


ウエストエクサ

側面と座面のエアバッグが膨らみ、
ウエストまわりを動かします。

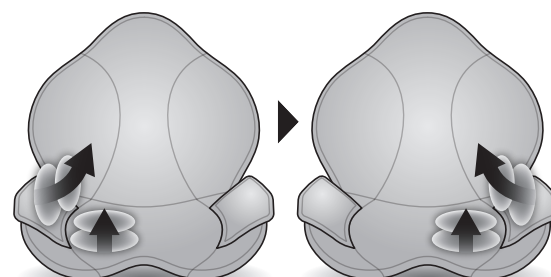


ヒップエクサ

座面のエアバッグが膨らみ、
お尻まわりを動かします。

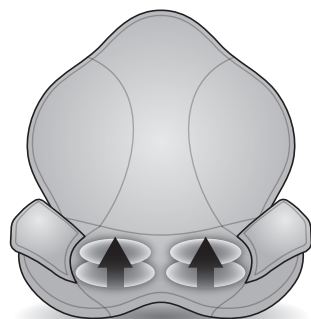

美整体ストレッチ

背面や側面のエアバッグが膨らみ、
背中や骨盤まわりをストレッチします。

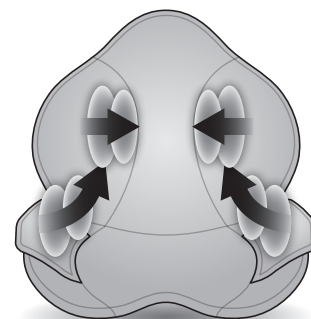

「故障かな？」と思ったら

修理を依頼される前に、もう一度次の項目をお確かめになり、それでも調子が悪いときにはただちに
ご使用を中止し、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

症 状	点 検	処 置
音が気になる	エアバッグのふくらむときの音、しばむ ときの音などの動作音。	構造上やむを得ず発生するもので機能な どに影響はありません。
動作しない	電源プラグがはずれている。	電源プラグをコンセントに差し込む。
	電源スイッチが入っていない。	電源スイッチを入れる。
	ACアダプタがはずれている。	ACアダプタを本体差込口に差し込む。
使用中に止まる	タイマーが働き、停止状態になっている。	30分以上間をあけてから再度操作する。

お手入れ・保管方法

！ 注 意



お手入れの際は、必ず電源プラグを
コンセントから抜いて行う。
(火災・感電の原因)



濡れた手で電源プラグの抜き差しを
しない。(感電の原因)



お手入れにはベンジン、シンナー、
アルカリ性洗剤、漂白剤などは使用
しないでください。(変色、変形、
割れの原因) (火災、感電の原因)

- ①本製品についた汚れは乾いたやわらかい布で拭き
取ってください。
- ②汚れがひどいときは、水または中性洗剤をしみこま
せた布をかたく絞って拭き取り、柔らかい布でから
拭きしてください。
- ③本製品に水などの液体がかからないようにしてください。
- ④自然乾燥にてよく乾かしてください。
※本製品表面の生地は取り外しできません。
- ⑤壁などに立てかけた状態で保管しないでください。
- ⑥汚れやホコリを取った後、湿気の少ない場所に保管
してください。
- ⑦しばらくご使用にならないときはカバーなどをかけ、
ホコリがつかないようにしてください。

ご注意

高温・多湿・直射日光の当たる場所、ホコリの多い場所に保管しないでください。

本製品の 廃棄方法について

地球環境保護のため、廃棄するときはお住まいの市区町村の指導に従ってください。

安全点検について

●長年ご使用の「骨盤プロリセットエアー」の点検を！

しばらく使用していなかった機器を使用するときは、使用前に機器が正常に動作する事を確認してください。



愛情点検

こんな症状はありませんか

- 電源プラグ、ACアダプタが異常に熱い
- コード類に深い傷や変形がある
- 焦げ臭いにおいが
する
- 動作中に異常な音や振動がある
- スイッチを
入れても、ときどき運転しないことがある
- エア
バッグが作動しない
- その他異常や故障がある

ご使用中止

左記のような症状のときは、
故障や事故防止のため、ご使用
を中止し電源プラグをコンセ
ントから抜いて、必ず販売店に
点検・修理をご相談ください。